

MUSTER_Gebrauchsanweisung für Secosol® Maßeinlagen / Schuhzurichtungen für PSA-Schuhe

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

heute haben Sie die speziell für Sie angefertigten und geprüften Einlagen / Schuhzurichtungen für PSA Schuhe für medizinische Zwecke erhalten. Damit Sie beschwerdefrei gehen können, beachten Sie bitte folgende Gebrauchs- und Pflegehinweise:

- Tragen Sie die Einlagen immer in Verbindung mit Socken. Laufen Sie Ihre Einlagen / zugerichteten Schuhe in den n\u00e4chsten 8-10 Tagen vorerst nur stundenweise ein und steigern Sie die Tragedauer von Tag zu Tag. Benutzen Sie die Ma\u00dfeinlagen nur in den damit gepr\u00fcften Sicherheitsschuhen.
- 2. Nehmen Sie die Einlagen zum Lüften regelmäßig aus den Schuhen. Zum Reinigen genügt das Abreiben mit einem feuchten Tuch. Behandeln Sie Verschmutzungen an zugerichteten Sicherheitsschuhen nicht mit scharfen Reinigungsmitteln. Trocknen Sie feucht gewordene Einlagen uns Schuhe bitte nie an der Heizung oder anderen Wärmequellen.
- 3. Sicherheitsschuhe mit verändertem Sohlenaufbau dürfen nur in Temperaturbereichen bis zu 60° Celsius eingesetzt werden.
- 4. Das Herstelldatum der Einlagen befindet sich auf dem Label an der Einlage (s.Bsp. Punkt 9). Die Tragezeit der Einlagen beträgt je nach Beanspruchung mindestens 6 Monate.
- 5. Die Entsorgung nach Ablauf des Lebenszyklus der PSA erfolgt nach den länderspezifischen gesetzlichen Vorgaben.
- 6. Das gelieferte Hilfsmittel ist eine Sonderanfertigung im Sinne der Verordnung über Persönliche Schutzausrüstung (PSA) EU 2016/425 und entspricht den Normen EN ISO 20345:2011 / EN ISO 20347:2012. Es ist ausschließlich von demjenigen zu benutzen, für den es angefertigt wurde.
- 7. Wenn der Anwender alle Risiken beachtet und Fehlanwendungen der Einlage vermeidet, ist hier nach Stand der Technik von einem sicheren Produkt auszugehen. Die Gefährdung von Gesundheit und Sicherheit von Dritten kann ausgeschlossen werden. Fehlanwendungen wie z.B.: Mutwillige Zerstörung, das Tragen der individuell gefertigten Einlage von einer anderen Person oder das Tragen der Einlage in einem nicht zertifizierten PSA Schuh kann den Schutz herabsetzen.
- 8. Die Prüfung über die Veränderung der Sicherheitsschuhe wurde durchgeführt von einem notifizierten Prüfinstitut. Die mit dem orthopädischen Einlagensystem Secosol® zertifizierten Modelle sowie eine EU Konformitätserklärung finden Sie im Schuhfinder auf www.insole-world.com
- Der Inverkehrbringer kennzeichnet die individuell gefertigten Einlagen (Bausätze 9516, A, B,C, Secosol Kit, Secosol dynamic entsprechend der europäischen Medizinprodukteverodnung (EU) 2017/745 (MDR).

QMF-Nr.: 8.6-2/1 Stand: 10/2021



Beispielhafte Darstellung:



Kennzeichnung der Fertigeinlage Complete+:

Beispielhafte Darstellung:



Beispiel Kennzeichnung Verpackung Compete+:



Die Ziffern 4-9 der Chargennummer P3D2107223348 geben einen Hinweis auf das Herstelldatum. In diesem Beispiel ist das Datum: 22. Juli 2021 benannt.

- 10. Die sich an den Schuhen befindliche Kennzeichnung gibt Hinweise auf:
- Hersteller und CE Kennzeichnung
- Typenbezeichnung, Artikelnummer, Größenangabe
- Symbol für Schutzfunktion, Herstellungsdatum
- Die angewandte Norm

Für weitere Gebrauchs- und Pflegehinweise beachten Sie bitte die beiliegende Gebrauchsanweisung des Schuhherstellers.

QMF-Nr.: 8.6-2/1 Stand: 10/2021

Bezirkssparkasse Dillenburg